

KN95CE-B

Respirátor KN95 FFP2 CE

černé



Respirátor FFP2, 10ks/balení černé

Číslo šarže a datum expirace naleznete v označení obalu. Vyrobeno v Číně.

Výrobek není určen pro lékařské účely.

1. Otevřete masku, abyste vytvořili svarku nosu nahoře, a oběma rukama vytáhněte ušní pásky
2. Přidržte masku u brady, aby zcela zakryla nos a ústa.
3. Natáhněte si ušní popruhy za uši a upravte je tak, abyste se cítili pohodlně
4. Oběma rukama upravte tvar nosní spony a zatlačte ji dovnitř, přičemž prsty pohybujte po obou stranách nosní spony, dokud nebude, zatlačte ji dovnitř, přičemž prsty pohybujte po obou stranách nosní spony, dokud nebude zatlačena tak, aby lícovala s nosem. (Vytvoření svěrky nosu pouze jednou rukou může ovlivnit těsnost masky).
5. Masku zakryjte rukou a energicky vydechněte. Pokud cítíte, že z nosní spony uniká vzduch, je nutné nosní sponu utáhnout: pokud vzduch uniká z okraje masky, upravte gumíčky, abyste zajistili těsnost. Metoda kontroly: Před použitím zkontrolujte, zda není poškozený obal masky a zda jsou neporušené součásti. V případě jakýchkoli skvrn nebo poškození okamžitě přestaňte používat. Před vstupem do pracovního prostoru je nutné zkontrolovat vzduchotěsnost masky. Pokud cítíte únik, noste jej znovu podle pokynů, jak nosit masku. Do pracovního prostoru můžete vstoupit až poté, co necítíte únik. (Pokud máte pocit, že je dýchací odpor zjevně zvýšený nebo maska nedosahuje standardu pro použití, doporučujeme masku okamžitě vyměnit) Materiál: 40% netkaná textilie, 25% foukané taveniny, 26% horkovzdušná bavlna, 5% ušní smyčka, 4% spona na nos, doporučené doba použití: max: 30 hod Vyrobeno: 1.2.2021, expirace: 31.1.2023 Skladování: vnitřní skladování s vlhkostí nižší než 80%, žádné korozivní plyny a dobře větratelné prostředí, mimo dosah tepla.